

## **ИНСТРУКЦИЯ по применению медицинского изделия**

### **Средство абсорбирующее кровоостанавливающее стерильное REVUL® (РЕВУЛ®)**

#### **Описание**

REVUL® (РЕВУЛ®) – высокоэффективное кровоостанавливающее средство на основе высокомолекулярного полимера природного происхождения. Представляет собой слабо гигроскопичный, мелкий порошок желтого или желто-белого цвета, без запаха. REVUL® (РЕВУЛ®) – стерильный гемостатический порошок для наружного применения.

#### **Содержимое упаковки**

Исполнение 14, 30 g (г), в пакете.

**Состав:** порошок 10 g (г) содержит:

Камедь рожкового дерева .....	9,6 g (г)
Кальция глюконат.....	0,4 g (г)

#### **Показания**

REVUL® (РЕВУЛ®) предназначен для остановки наружного кровотечения разной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов, преимущественно на догоспитальном этапе. REVUL® (РЕВУЛ®) может быть использован в клинических, полевых условиях и в быту.

#### **Механизм действия**

При взаимодействии порошка с кровью, REVUL® (РЕВУЛ®), за счет большой молекулярной массы молекул, насыщенных гидроксильными группами, образует водородные связи с водой (составляет 90–95 % крови), что приводит к агрегации форменных элементов крови и факторов свертывания в месте контакта с последующим образованием кровяного сгустка.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам изделия.

#### **Способ применения и дозы**

1. Перед применением REVUL® (РЕВУЛ®) очистите рану от инородных тел и кровяных сгустков для обеспечения максимального контакта порошка с поврежденным сосудом. REVUL® (РЕВУЛ®) применяется путем засыпания порошка непосредственно в источник кровотечения.
2. Проверьте срок годности и целостность упаковки медицинского изделия.
3. Промокните рану бинтом или каким-либо другим доступным материалом.
4. Откройте пакет.
5. Заполните рану содержимым пакета. **НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ПУСТОЙ ПАКЕТ!**
6. Плотно прижмите к ране бинт или марлевый тампон в течение 5 минут. Если кровотечение не останавливается, удерживайте еще 5 минут.

**Примечание.** При сильных кровотечениях утрамбовать порошок в рану любым доступным способом, чтобы избежать вымывания порошка током крови.

**Если ранение большое, и для его заполнения одного пакета недостаточно, возьмите еще один пакет.**

7. Наложите на рану давящую повязку.
8. Как можно быстрее доставьте потерпевшего в ближайший пункт первой медицинской помощи.
9. Передайте пустой пакет медицинским работникам.
10. Не используйте остатки порошка.

### **Информация для медицинского персонала**

1. Тщательно очистить рану.
2. Остатки изделия удалить из раны путем тщательного промывания раны теплым 0,9 % раствором натрия хлорида до полного удаления кровяных сгустков, остатков изделия и других инородных тел.
3. Провести обработку раны согласно стандартным утвержденным клиническим протоколам.

### **Побочные реакции**

Реакции повышенной чувствительности.

### **Надлежащие меры безопасности при применении**

Упаковку REVUL® (РЕВУЛ®) раскрывать непосредственно перед применением, средство повторному использованию не подлежит.

Не использовать изделие если истек срок годности.

Не использовать изделие при повреждении первичной упаковки.

Изделие только для наружного применения. Избегайте попадания в дыхательные пути и в глаза. При попадании в глаза немедленно смойте большим количеством воды.

**Срок годности:** 3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте при температуре от +5 °С до +30 °С.

### **Название и адрес производителя**

ООО «Юрия-фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10.





Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.



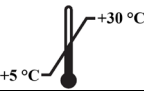





E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua

www.revul.com.ua

Адрес производства: Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Чигиринская, 21/13.

<b>Графические символы и их разъяснение</b>	
	Conformity mark to the Technical regulations for medical devices and the code of the conformity assessment body/Знак соответствия Техническим регламентам для медицинских изделий и код органа по оценке соответствия
	Sterile. Sterilized using irradiation/Стерильно. Стерилизовано с использованием облучения
	Do not re-use/Не использовать повторно
	Manufacturer/Производитель

	Do not use if package is damaged/Не использовать при повреждении упаковки
	Humidity limitation/Ограничение влажности
	Temperature limit/Температурное ограничение
	Caution/Предостережение
	Consult instructions for use/Ознакомление с инструкциями по применению
	Date of manufacture/Дата изготовления
	Use-by date/Не использовать после
партия 	Batch code/Код партии

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 23.02.2021.

Версия: 03.