

ИНСТРУКЦИЯ **по применению медицинского изделия**

Раствор для интраназального применения SNOTTY® (СНОТТИ®)

Состав

1 ml (мл) раствора содержит:

Ксилитол.....	120 mg (мг)
Натрия хлорид.....	9 mg (мг)
Вода для инъекций	до 1 ml (мл)

Содержимое упаковки

Раствор для интраназального применения в 10 контейнерах по 2 ml (мл).

Инструкция по применению медицинского изделия.

Описание

SNOTTY® (СНОТТИ®) — раствор, очищает носовые ходы и пазухи, устраняя загрязняющие и раздражающие вещества. **SNOTTY® (СНОТТИ®)** быстро устраняет заложенность носа при респираторных инфекциях верхних дыхательных путей и аллергиях.

Ксилитол является основным компонентом медицинского изделия. В условиях снижения pH он стабилизирует белковые структуры клеток. Благодаря осмолитическим свойствам регулирует солевой обмен на поверхности слизистой носа и носоглотки. Высокая концентрация ксилитола (12 %) осложняет адгезию (прилипание) микроорганизмов к клеткам слизистой, препятствует образованию биопленок, оказывает антимикробное влияние на некоторые виды патогенов.

Ксилитол разжижает и облегчает выведение слизи, удерживает влагу, благодаря чему увлажняет и успокаивает раздраженную слизистую носа, облегчает дыхание и улучшает качество сна у пациентов с острым и хроническим течением инфекционных и аллергических заболеваний полости носа, придаточных пазух и носоглотки. Наличие ксилитола обуславливает сладкий вкус.

Концентрация компонентов медицинского изделия обуславливает гиперосмолярность раствора, благодаря чему помогает выводить избыток влаги и устранять отек слизистой оболочки носовых ходов и пазух.

Составляющие медицинского изделия не вступают в реакции с организмом человека и инертны к нему, не вызывают фармакологическое, иммунобиологическое и метаболическое привыкание.

Не содержит консерванты.

Стерильно.

Целевое назначение

SNOTTY® (СНОТТИ®) — раствор для интраназального введения, устраняющий отек слизистой оболочки носовых ходов и пазух, облегчающий дыхание путем очищения, разрежения и улучшения выведения секрета.

Целевая группа

Дети, в том числе младенцы, и взрослые.

Показания

В качестве дополнительного средства при инфекционных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки.

В качестве средства, способствующего удалению назального секрета и устранению заложенности носа при затрудненном носовом дыхании.

Для ежедневной гигиены полости носа.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту медицинского изделия.

Побочные эффекты

Реакции повышенной чувствительности, жжение слизистой полости носа.

В случае возникновения любых побочных реакций следует немедленно прекратить использование медицинского изделия и сообщить врачу и производителю.

Предупреждение и меры предосторожности

- Используйте **SNOTTY® (СНОТТИ®)** в соответствии с инструкцией по применению. Не используйте иные способы, отличные от изложенных в данной инструкции по применению медицинского изделия. Проконсультируйтесь с врачом перед применением, если у вас есть вопросы.
- Не используйте один и тот же полимерный контейнер для нескольких пациентов. Использование одного полимерного контейнера более чем одним человеком может вызвать распространение инфекции.
- Изделие предназначено для однократного применения. Повторное использование может привести к инфицированию. Не используйте повторно.
- Запрещается подвергать повторной стерилизации.
- Не используйте одновременно с другими средствами для интраназального введения. При необходимости интраназального применения другого медицинского изделия или лекарственного средства следует сделать промежуток между их использованием не менее 15 минут.
- Не нагревайте контейнер с раствором. При хранении в холодильнике перед применением следует выдержать изделие в течение 15–30 минут при комнатной температуре.
- Не смешивайте с какими-либо растворами, лекарственными средствами и т. п.
- Отсутствуют доступные клинические данные об эффективности и переносимости медицинского изделия в период беременности и грудного вскармливания. Этой категории пациентов следует проконсультироваться с лечащим врачом перед применением медицинского изделия.
- Утилизировать в соответствии с местными требованиями по утилизации отходов.

Взаимодействия

Не обнаружено.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Способ использования

SNOTTY® (СНОТТИ®) предназначен для интраназального введения. Закапывать в каждый носовой ход 2–4 раза в сутки:

- детям до 1 года по 1–3 капли;
- детям от 1 до 6 лет – по 2–3 капли;
- детям от 6 лет и взрослым – по 2–4 капли.

При необходимости кратность применения может быть увеличена. Продолжительность использования определяют индивидуально.

Использование детьми должно проходить под наблюдением или с помощью взрослых.

Перед началом процедуры следует вымыть руки с мылом и осторожно освободить носовые ходы от секрета.

Перед использованием медицинского изделия проверьте целостность упаковки и срок годности. Не используйте изделие при повреждении первичной упаковки или окончания срока службы.

Держите однодозовый контейнер за верхний край, поверните другой край, чтобы открыть контейнер.

При применении грудным детям: положите ребенка на спину и поверните его голову набок.

При применении детям и взрослым: сидя или стоя, наклонив голову.

Поочередно в каждый носовой ход введите открытый однодозовый контейнер (действуйте осторожно во избежание травм) и осторожно нажмите (при этом лицу, которому вводят капли, следует дышать через рот или задержать дыхание на вдохе). Впрыск необходимо провести в левое носовое отверстие, наклонив голову направо и наоборот – в правое носовое отверстие, наклонив голову налево.

После процедуры нужно держать голову прямо, чтобы жидкость могла свободно стекать с носа.

При обильном выделении секрета при необходимости можно провести несколько процедур подряд.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от солнечных лучей месте при температуре до +25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Срок годности действителен при соблюдении условий хранения в оригинальной упаковке.

Название и адрес производителя

ООО «Юрия-Фарм», Украина, 03038, г. Киев, ул. Н. Амосова, 10.

Тел.: +38 (044) 275-92-42, +38 (044) 275-01-08.

E-mail: uf@uf.ua

www.uf.ua

Адрес производства: Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Кобзарская, 108.

Тел.: +38 (044) 281-01-01.



Если у вас есть замечания к медицинскому изделию или вы хотите оставить отзыв, пожалуйста, воспользуйтесь одним из следующих способов:

- 1) отправьте письмо на электронную почту feedback@uf.ua;
- 2) отправьте текстовое сообщение с помощью приложений Viber, Telegram или WhatsApp на номер +38 (095) 275-33-01;
- 3) позвоните по телефону +38 (095) 275-33-01 (тарификация звонков согласно тарифам вашего оператора) или +38 (0800) 401-771 (бесплатно с любого номера в Украине).

Графические символы и их разъяснение	
	Sterile medical device in primary packaging. Sterilized using steam or dry heat / Стерильное медицинское изделие в первичной упаковке. Стерилизовано с использованием пара или сухого тепла
	Manufacturer / Производитель
	Date of manufacture / Дата изготовления
	Consult instructions for use / Ознакомление с инструкциями по применению
партия 	Batch code / Код партии
	Use-by date / Не применять после
	Do not use if package is damaged / Не использовать при повреждении упаковки
	Upper limit of temperature / Верхний предел температуры
 UA.TR.099	Conformity mark to technical regulations and identification number of the designated conformity assessment body / Знак соответствия техническим регламентам и идентификационный номер назначенного органа для оценки соответствия
	Do not re-use / Не использовать повторно
	Keep away from sunlight / Беречь от солнечных лучей
	Keep dry / Беречь от влаги

Дата последнего просмотра инструкции по применению: 30.04.2024г.

Версия: 02.